



USO CORRECTO SISTEMA IDENT-PLUS IDENTIFICACIÓN MADRE-RECIÉN NACIDO

MODO DE EMPLEO

- 1** CONTENIDO DEL ENVASE:
 - 1 PINZA UMBILICAL NUMERADA
 - 1 BRAZALETE ADULTO NUMERADO
 - 1 BRAZALETE INFANTIL NUMERADO
 - 2 ETIQUETAS ADHESIVAS NUMERADAS
- 2** NO UTILIZAR EN CASO QUE NO COINCIDAN LOS NUMEROS DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS
- 3** COLOCAR Y CERRAR LA PINZA UMBILICAL
- 4** PONER EL BRAZALETE EN LA MUÑECA DE LA MADRE CERRANDO CON FUERZA EL ENGANCHE
- 5** COLOCAR EL BRAZALETE EN EL TOBILLO DEL RECIÉN NACIDO
- 6** PEGAR LAS ETIQUETAS ADHESIVAS EN EL PARTOGRAMA Y/O INFORME DEL NACIMIENTO CORRESPONDIENTE



www.ident-plus.com



**IMPORTANTE:
ENTREGAR EN SALA DE PARTOS
(COLOCAR EN LUGAR VISIBLE)**

